



Mod. MF02 - Rev A 05-2020



berrino
dal 1950 una famiglia di stampatori

IMPORTANTE

È fondamentale adottare tutte le misure anti contagio attualmente in vigore, ivi inclusa la distanza di sicurezza interpersonale. A tal riguardo si informa che, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 e dalla Circolare n. DGDMF/0003572/P/18/03/2020 emanata dal Ministero della Salute, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 è consentito a tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid-19, di utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come DM né come DPI. Resta inteso che tali mascherine non possono essere utilizzate durante il servizio degli operatori sanitari né dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza.

La mascherina non è provvista di marchio CE. È una mascherina facciale igienica ad uso generico. La mascherina non garantisce in nessun modo la protezione delle vie respiratorie di chi la indossa. Le mascherine igieniche (protezione naso bocca) non offrono una protezione efficace contro i patogeni.

Utilizzare questo prodotto solo nel rispetto di quanto sopra indicato, ogni altro uso è da considerarsi improprio e potenzialmente pericoloso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. **ATTENZIONE:** Leggere e conservare queste informazioni e istruzioni per futura referenza.

Mascherina facciale igienica
ad uso generico, doppio velo filtrante,
antibatterica, morbida, individuale, antigoccia,
con elastici e ferretto chiudi naso.



Mod. MF02
Mod. MF02P

*Variante Mod. MF02P
con stampa personalizzata
polimerizzata sullo strato esterno.*

® Prodotto Registrato

Prodotto e confezionato da:

Berrino Printer srl

Via Liguria, 12 - 10099 San Mauro Torinese
lyo@berrinoprinter.it - www.berrinoprinter.it

berrino
dal 1950 una famiglia di stampatori

Lotto 200891

PRODOTTO MADE IN ITALY



Rapporto di Prova numero 001/2020

Standard EN 14683:2019 - 5.2.2

Efficienza di filtrazione batterica (BFE)

Lo standard specifica i requisiti di fabbricazione, progettazione e prestazione e i metodi di prova per le maschere facciali ad uso medico destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi tra pazienti e personale sanitario durante gli interventi chirurgici e altri contesti medici con requisiti simili.

Denominazione del prodotto	Tessuto filtrante					
Azienda Produttrice	Ahlstrom Munksjö					
Descrizione	Fogli di tessuto filtrante in poliestere					
Numero di lotto (batch code)	FF 70/310 PBT PB SMS, PF209234					
Dimensione dell'area di test	50.3 cm ²					
Lato del campione esposto all'aerosol	Non rilevante					
Portata	28.3 ± 0.2 l/min					
Valore medio della conta totale delle piastre dei due controlli positivi	354.5 CFU					
Valore medio della conta totale delle piastre del controllo negativo	4 CFU					
Campione	1	2	3	4	5	M
BFE (%)	94.6	95.8	98.0	97.7	98.6	99.8

Poiché non risulta specificato un "gold standard" per la taratura del sistema di misura (e quindi l'incertezza dello stesso è incognita) viene assunto come valore finale della prova il limite di confidenza superiore (al 95%) delle misure effettuate, ove il coefficiente di variazione sia inferiore al 5%. Tale valore, in questo caso, è pari al 1.5 %.

A seguito delle prove effettuate secondo lo standard EN 14683:2019 (che include il corrigendum di agosto 2019), è risultato che il prodotto sottoposto a test RISPETTA i requisiti di efficienza di filtrazione batterica dello standard (paragrafo 5.2.2 e Appendice B) per il Tipo I e II.



Non è un DPI.
Non è un presidio medico.

Come mettere correttamente la mascherina:

Step 1 Lavare le mani con apposito prodotto o con abbondante sapone e acqua.	Step 2 Assicurarsi che non siano presenti corpi estranei nella mascherina.	Step 3 Posizionare la mascherina dal lato corretto, la parte dritta va in alto.	Step 4 Posizionare la mascherina sul viso assicurandosi di coprire bene il naso e bocca.	Step 5 Modellare il ferretto in modo che la mascherina sia ben aderente.

ISTRUZIONI

Non è un prodotto sterile. La mascherina è riutilizzabile, ma la sua capacità filtrante ai batteri diminuisce con il tempo di utilizzo e con le caratteristiche dell'ambiente esterno.

Avvertenze

Non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale, ma un prodotto ad uso della collettività ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, N. 18 Art. 16, Comma 2. Prima di indossarla igienizzare le mani con apposito prodotto o lavandosi con abbondante sapone e acqua.

Modalità d'uso

Posizionarla sul viso assicurandosi di coprire bene il naso e la bocca ponendo attenzione al senso di orientamento (la parte più stretta va in alto) e agganciarla tramite gli elastici dietro le orecchie. Modellare il ferretto in modo che sia aderente al naso. Non indossarla su epidermide lesa o su ferite. Non è stata testata per fare sport.

Tempo di utilizzo

Sostituirla con una nuova non appena è significativamente umida o bagnata, sporca, strappata oppure dopo essere venuti a contatto con persone o ambienti contaminati.

Dati tecnici

Dimensioni aperta 220x280mm. Composizione 100% poliestere, taglia unica, con ferretto.

Composizione

Doppio velo 100% poliestere sintetico peso 70gr/m², 2 strati esterni in Spunbond (PET)+1 strato interno Meltblown. Non sono presenti colle, fibre di vetro. Non sono presenti restrizioni ai sensi del Regolamento comunitario n° 1907/2006 (REACH).

Conformità

Il materiale con cui è costruita la mascherina, elastici esclusi, a seguito del rapporto di prova numero 001/2020 effettuato dall'Università di Bologna secondo lo standard EN 14683: 2019 - 5.2.2 efficienza di filtrazione batterica (BFE) risulta rispettare i requisiti per le tipologie I e II.

Controindicazioni

Un uso non corretto della mascherina può aumentare, anziché ridurre, il rischio di trasmissione di infezioni. È vietato apportare modifiche al prodotto. Qualsiasi danno derivante dal suo utilizzo, modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.

Smaltire nella raccolta indifferenziata.

Come togliere correttamente la mascherina:

Step 1 Lavare le mani con apposito prodotto o con abbondante sapone e acqua.	Step 2 Non toccare la parte esterna della mascherina perché è contaminata.	Step 3 Rimuovere la mascherina partendo dagli elastici. Con l'aiuto delle dita, allontanare delicatamente gli elastici dalle orecchie.	Step 4 Smaltire la mascherina usata, nella raccolta indifferenziata.	Step 5 Lavare le mani con apposito prodotto o con abbondante sapone e acqua.